

HYGIENISCHER VERBANDSWECHSEL RICHTIG GEMACHT.

VORBEREITUNG DES VERBANDSWECHSELS



1 Arbeitsbereich desinfizieren (Schutzhandschuhe!) ggf Arbeitsbereich mit flüssigkeitsundurchlässiger Sterilabdeckung ausstatten.



2 Hygienische Händedesinfektion
Gerne können Sie sich das Übersichtsposter „Händedesinfektion nach EN 1500“ auf unserer Website downloaden



3 Materialien bereitstellen. Patient und Wunde in eine gute Position bringen.



4 Lange Haare zurück binden. Kurzärmliges Oberteil tragen. Infizierte Wunden, freiliegende Knochen/Muskeln: OP Haube, chir. Maske



5 Flüssigkeitsundurchlässige Einwegschrürze anziehen; hygienische Händedesinfektion durchführen; Untersuchungshandschuhe anziehen.



6 Verband abnehmen und Wundauflage behutsam entfernen. **Tipp:** Anhaftende Wundauflagen durch Spülung mit ProntoVet® Spüllösung anlösen.



7 Berührungsfreie Technik: Wundauflage mit steriler Pinzette oder sterilen Handschuhen entfernen.



8 Verband auf Farbe, Geruch, Menge des Exsudats prüfen, ggf. Wundabstrich für bakteriologische Untersuchung.



9 Entsorgen Sie Einwegmaterialien und Abfälle direkt in einem flüssigkeitsundurchlässigen Eimer entsorgen.



10 Entsorgen Sie scharfe Gegenstände in einem durchstichsicheren Behälter mit verschließbarem Deckel.



11 Wiederverwendbare Instrumente sofort nach Gebrauch in die Instrumentenablage legen.



12 Handschuhe wechseln; hygienische Händedesinfektion durchführen.



13 Gezielte Reinigung der Wunde mit steriler Spüllösung; Herstellerangaben beachten!



14 Aseptische Wunden von innen nach außen reinigen, septische Wunden von außen nach innen reinigen, pro Wisch ein steriles Pad / Tupfer verwenden.



15 Spülen Sie tiefe Wunden direkt aus der Flasche oder mit einer sterilen Knopfkanüle / einem Spülkatheter.



16 Spülen Sie tiefe Wunden direkt aus der Flasche oder mit einer sterilen Knopfkanüle / einem Spülkatheter.




17 Handschuhe wechseln; hygienische Händedesinfektion durchführen.



18 Wunde inspizieren; Wunde dokumentieren, ggf. mit Foto.



19 Ggf. Wundränder / Umgebung mit einem sterilen Hautschutz schützen.

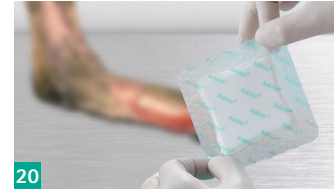

20 Neuen Verband anlegen.



Beispiele aus der B. Braun-Produktpalette.



ProntoVet® Spüllösung und Wundgel – Hydrogele mit Polyhexanid und Betain.



Askina® Sorb – Calciumalginat mit CMC (Einsetzen mit steriler Pinzette).



Askina® Foam – nicht haftender Schaumstoff-Verband.



Askina® Calgitrol® – Calciumalginat mit Silber (direkt aus der Tube anwenden, dabei direkten Kontakt vermeiden).



Askina® DresSil Border – Schaumstoffverband mit Silikonbeschichtung.



Askina® SilNet Plus – Silikon-Distanzgitter (in Kombination mit absorbierender Wundauflage).

ABSCHLUSS



21 Entsorgen Sie Einweg- und Abfallmaterialien; desinfizieren Sie alle patientennahen Bereiche.



22 Einweghandschuhe und Schutzkleidung entfernen und entsorgen.



23 Führen Sie alle weiteren angeordneten Maßnahmen durch, z. B. Hautpflege und Anlegen eines Kompressionsverbandes.



24 Hygienische Händedesinfektion



25 Dokumentieren Sie den Verbandwechsel.



Zeitpunkt des Verbandwechsels entsprechend dem Zustand der Wunde und den Bedürfnissen und Zielen des Patienten anpassen.



www.bbraun-vetcare.de/wundtherapie

GUT ZU WISSEN

- Tragen Sie keinen Schmuck (z. B. Ringe oder Uhren).
- Tragen Sie spezielle Schutzkleidung, wenn die Wunde mit resistenten Keimen kontaminiert ist.
- Koordiniertes Vorgehen, alle an der Patientenbehandlung beteiligten Fachkräfte schulen.
- Behandeln Sie septische Wunden immer mit der gleichen hygienischen Sorgfalt wie bei aseptischen Wunden.
- Halten Sie die Reihenfolge des Verbandwechsels ein: Zuerst aseptische Wunden, dann kontaminierte Wunden, danach infizierte Wunden. Versorgen Sie Wunden mit resistenten Erregern zuletzt.
- Bei großen Wunden sollten die Verbände von zwei Personen gewechselt werden (eine tatsächlich wechselnd, die andere assistierend), um das Risiko einer Kontamination der Umgebung zu verringern!
- Wunde nie mit bloßen Händen berühren (No-Touch-Technik).
- Erforderliche Materialien auf dem Arbeitsbereich / Verbandwagen bereitstellen:
 - unsterile Materialien in Patientennähe
 - sterile Materialien entfernt vom Patienten
- Sterilverpackungen auf Verfallsdatum und Unversehrtheit prüfen und erst kurz vor Gebrauch öffnen.
- Verwenden Sie unsterile Handschuhe und sterile Instrumente oder sterile Handschuhe an der Wunde.
- Halten Sie Türen und Fenster geschlossen und führen Sie keine anderen Tätigkeiten im Raum aus.

Die Hauptproduktmarke "Askina" ist eine eingetragene Marken der B. Braun Melsungen AG. Die Hauptproduktmarke "ProntoVet" ist eine eingetragene Marken der Aesculap AG. Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

D-VE21003